

KONTROLA STERILIZACE testy průniku páry

BAG – AutoCheck – Kit / BAG – AutoCheck – Kit II

Souprava k provedení denní Bowie - Dickovy zkoušky pro několikanásobné použití (formát A6).

KATALOGOVÉ ČÍSLO: 7521

7561 – neobsahuje olovo

BALENÍ: 2 balíčky kartónových papírů (každý na 15 použití) a 30 indikačních listů pro B-D zkoušku.

POPIS:

Souprava obsahuje:

- 1) Dva balíčky kartónového papíru o rozměrech 150 x 120 mm, z nichž jeden je v barvě bílé, druhý v barvě zelené, každý je vysoký 17 mm.
- 2) Vrchní bílý papír, který je potištěn arabskými číslicemi v kroužku od 1 do 15, aby bylo možno zaznamenávat počet opakovaného použití papírů.
- 3) Indikační listy Bowie-Dickovy zkoušky formátu A6 se světle modrým, resp. modrým obrazcem, které se vkládají mezi bílou a zelenou vrstvu kartónových papírů. Takto připravená souprava se exponuje ve sterilizátoru při teplotě 134°C po dobu 3,5 minuty, po které se obrazec při správné teplotě, expozici, při správném odvodu páry zbarví rovnoměrně černě.
- 4) Jedná se o indikátor **třídy 2** k dennímu provádění B-D zkoušky podle ČSN EN ISO 15882, resp. ČSN EN ISO11140-1 a ČSN EN ISO 11140-4.

Použití:

1. Umístěte indikační list mezi vrstvu zelených a bílých kartónových papírů.
2. Zapište datum zkoušky do kruhu na vrchním bílém papíru.
3. Vložte testovací balíček do kovového stojánu.
4. Umístěte testovací soupravu do středu prázdného sterilizátoru ke dveřím.
5. Odstartujte program Bowie-Dickovy zkoušky (3,5 minuty při 134°C).
6. Po skončení cyklu vyjměte stojánek ze sterilizátoru, vyhodnoťte indikační list, vyplňte předepsané údaje a indikační list uchovejte.


HODNOCENÍ:

Zkouška vyhovující - celý obrazec indikátoru se rovnoměrně zbarvil černě.

Zkouška nevhovující - obrazec indikátoru se zbarvil nerovnoměrně, příp. střed je zcela nezměněn. V takovém případě se test opakuje. Je-li nevhovující i podruhé, je třeba k přístroji přivolat servisního technika.

SKLADOVÁNÍ: na suchém místě, při pokojové teplotě do 30°C.

EXPIRACE: 3 roky od data výroby.

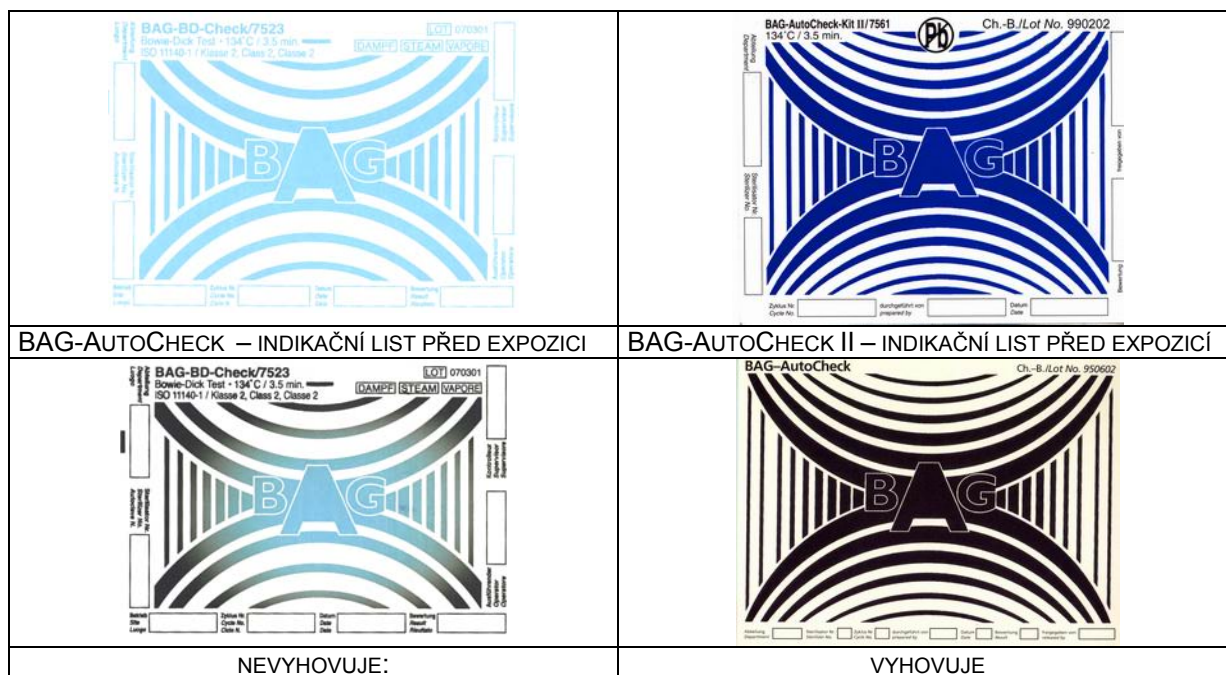

BAG – CCS - Druckhalter

Stojánek pro Bowie-Dickovou zkoušku z nerezavějící oceli, formát A6 pro kat.č.7521, 7561.

Balení: 1

Katalogové číslo: 74651



kovový stojánek pro AutoCheck Kit I a II



kovový stojánek pro AutoCheck Kit I a II

POZOR, VÝHODNÁ AKCE TRVÁ!

BAG STÁLE NABÍZÍ SVÝM ZÁKAZNÍKŮM MOŽNOST ZÍSKAT ZDARMA KOVOVÝ STOJÁNEK FORMÁTU A6 K PROVÁDĚNÍ DENNÍCH B.- D. TESTŮ A TO BUĎ FORMOU DLOUHODOBÉ ZÁPŮJČKY NEBO PŘÍMO DO VLASTNICTVÍ ZÁKAZNÍKA.

Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce.

BAG - GreenCard

Chemický indikátor pro denní Bowie-Dickovu zkoušku dle ČSN EN ISO 11140-4.

KATALOGOVÉ ČÍSLO: 7564

POČET KUSŮ V BALENÍ: 30

EXPIRACE: 3 roky od data výroby.

Použití:

BAG-GreenCard byl navržen pro denní zkoušku vysokovakuovaných parních sterilizátorů, která se provádí 3,5 minuty při 134°C, s cílem odhalit nedostatečné odvzdušnění komory, nedostatečný průnik vzduchu ve fázi vakua, nekondenzovatelné plyny v páře, nedostatečnou teplotu a sytost páry, zbytkový vzduch v přívodním potrubí páry (alternativa ke klasické Bowie-Dickově zkoušce). Tento test splňuje normu ČSN EN ISO 11140-1, ČSN EN ISO 11140-4 a ČSN EN ISO 15881.

Interpretace výsledků:

Dobře provedená zkouška ve správně fungujícím sterilizátoru by měla vést k rovnoměrně zelenému zbarvení celého indikačního vzoru. V případě významného množství zbytkového vzduchu je typickým výsledkem fialový střed indikátoru. Pokud dojde k takovému výsledku, doporučujeme

opakovat test, abychom se ujistili, že důvodem nebyla ojedinělá událost v průběhu jednoho cyklu, a že bylo provedeno řádné přehřátí sterilizátoru.



STOJÁNEK PRO BAG-GREENCARD