

KONTROLA STERILIZACE

testy průniku páry

BAG – BD - Check / BAG – BD - Check II

Jednorázový testovací balíček k provedení denní Bowie-Dickovy zkoušky.

KATALOGOVÉ ČÍSLO: 7523 BAG-BD-Check
7563 BAG-BD-Check II -neobsahuje olovo
POČET KS V BALENÍ: 30

POPIS:

Jde o uzavřený balíček obsahující listy papíru, v jejichž středu je uložen indikační list pro Bowie-Dickovu zkoušku. Indikační listy pro B.-D. zkoušku (formát A6) mají na bílém papírovém podkladu světle modrý, resp. modrý čárový obrazec uprostřed s nápisem „BAG“. Je určen ke zjištění správného odvodu vzduchu z komory sterilizátoru a průniku páry. Jedná se o indikátor **třídy 2** pro denní provádění Bowie-Dickovy zkoušky dle ČSN EN ISO 15882, ČSN EN ISO 11140-1 a ČSN EN ISO 11140-4.

POUŽITÍ:

1. Umístěte testovací balíček do prázdného sterilizátoru ke dveřím.

2. Odstartujte program Bowie - Dickovy zkoušky : 3,5 minuty při 134°C.
3. Po skončení cyklu z testovacího balíčku vyjměte a vyhodnoťte indikační list, vyplňte předepsané údaje a indikační list uschovejte.

HODNOCENÍ:

Zkouška úspěšná - celý obrazec indikátoru se stejnoměrně zabarvil černě.

Zkouška nevyhovující - obrazec indikátoru se zabarvil nestejně, příp. střed je zcela nezměněn. V takovém případě se test opakuje. Nevyhoví-li ani podruhé, je třeba k přístroji přivolat servisního technika.

SKLADOVÁNÍ: na suchém místě, při pokojové teplotě do 30°C

EXPIRACE: 3 roky od data výroby

