

BAG - BlackCheck C

Laminovaný chemický indikátor pro monitorování sterilizace vlhkým teplem při všech sterilizačních teplotách.

KATALOGOVÉ ČÍSLO: 7514

POČET KS V BALENÍ: 250

POPIS:

Laminované papírové proužky o velikosti 96 mm x 16mm. V levém horním rohu je název indikátoru, pod tímto nápisem je ve třech jazycích uvedena zkratka pro popis způsobu sterilizace, tj. sterilizace parou.

V levém dolním rohu je uvedeno číslo šarže. V prostřední části indikátoru je uvedena norma, kterou indikátor splňuje a dále ve třech jazycích třída indikátoru, do které je indikátor zařazen dle uvedené normy. V pravé třetině je velkými tiskacími písmeny žluté barvy napsáno „BAG“ a zleva, vedle tohoto nápisu, je černá šipka, jejíž barva se během expozice nemění. Žlutá barva nápisu „BAG“ by se měla změnit během expozice na černou, stejnou jako je barva šipky.

Indikátor BAG-BlackCheck C je zařazen do **třídy 4** (ČSN EN ISO 15882, ČSN EN ISO 11140-1).

Použití:

1. Umístěte indikátor BAG-BlackCheck C do každého sterilizačního kontejneru nebo do komory sterilizátoru (počet indikátorů se řídí počtem sterilizačních jednotek).
2. Proveďte sterilizaci.
3. Zkontrolujte změnu barvy indikátoru před použitím vysterilizovaného materiálu.
4. **Vyhovující sterilizace** :
Kombinace písmen "BAG" zcela změnila barvu ze žluté na černou.
Nevyhovující sterilizace :
Kombinace písmen "BAG" změnila barvu na béžovou nebo hnědou. *Nepoužívejte takto sterilizovaný materiál, zkontrolujte sterilizační zařízení a zopakujte sterilizaci.*
5. Zaznamenejte výsledky.

SKLADOVÁNÍ: na suchém místě při pokojové teplotě.

EXPIRACE : 3 roky od data výroby.

	
INDIKÁTOR PŘED EXPOZICÍ	INDIKÁTOR PO SPRÁVNÉ EXPOZICI