

BAG – CCS - Druckhalter

Stojánek pro Bowie-Dickovou zkoušku z nerezavějící oceli, formát A6 pro kat.č.7521, 7561.

Balení: 1

Katalogové číslo: 74651



kovový stojánek pro AutoCheck Kit I a II



kovový stojánek pro AutoCheck Kit I a II

POZOR, VÝHODNÁ AKCE TRVÁ!

BAG STÁLE NABÍZÍ SVÝM ZÁKAZNÍKŮM MOŽNOST ZÍSKAT ZDARMA KOVOVÝ STOJÁNEK FORMÁTU A6 K PROVÁDĚNÍ DENNÍCH B.- D. TESTŮ A TO BUĎ FORMOU DLOUHODOBÉ ZÁPŮJČKY NEBO PŘÍMO DO VLASTNICTVÍ ZÁKAZNÍKA.

Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce.

BAG - GreenCard

Chemický indikátor pro denní Bowie-Dickovu zkoušku dle ČSN EN ISO 11140-4.

KATALOGOVÉ ČÍSLO: 7564

POČET KUSŮ V BALENÍ: 30

EXPIRACE: 3 roky od data výroby.

Použití:

BAG-GreenCard byl navržen pro denní zkoušku vysokovakuovaných parních sterilizátorů, která se provádí 3,5 minuty při 134°C, s cílem odhalit nedostatečné odvzdušnění komory, nedostatečný průnik vzduchu ve fázi vakua, nekondenzovatelné plyny v páře, nedostatečnou teplotu a sytost páry, zbytkový vzduch v přívodním potrubí páry (alternativa ke klasické Bowie-Dickově zkoušce). Tento test splňuje normu ČSN EN ISO 11140-1, ČSN EN ISO 11140-4 a ČSN EN ISO 15881.

Interpretace výsledků:

Dobře provedená zkouška ve správně fungujícím sterilizátoru by měla vést k rovnoměrně zelenému zbarvení celého indikačního vzoru. V případě významného množství zbytkového vzduchu je typickým výsledkem fialový střed indikátoru. Pokud dojde k takovému výsledku, doporučujeme

opakovat test, abychom se ujistili, že důvodem nebyla ojedinělá událost v průběhu jednoho cyklu, a že bylo provedeno řádné přehřátí sterilizátoru.



STOJÁNEK PRO BAG-GREENCARD