

KONTROLA STERILIZACE chemické indikátory

BAG – RePac

Souprava k monitorování sterilizace vlhkým teplem, zátěžový test.

KATALOGOVÉ ČÍSLO: 7541 BAG - RePac 121°C
7542 BAG - RePac 134°C

POČET KS V BALENÍ: 300/1500

POPIS:

RePac je chemickým testem sterilizace pro použití ve sterilizátorech sterilizujících vlhkým teplem, monitoruje nedostatečné odvodušnění komory sterilizátoru, nízkou, resp. vysokou sterilizační teplotu nebo krátkou, resp. dlouhou expoziční dobu a parametry páry. Souprava obsahuje:

1. Kovový válec o rozměrech délka 110 mm, vnější průměr 30 mm, na horní straně opatřený sponkou, 1 kus.
2. Dvacet listů RePac, každý po 15 kruhových testech, odpovídající vnitřnímu průměru kovového válce s určením pro teplotu 121 °C nebo 134 °C. Na těchto kruhových terčích je v barvě zelené nadpis tohoto testu a teplota, pro kterou je terč určen, v barvě purpurové jsou dva soustředné kruhy, které při úspěšně proběhlé sterilizaci mění barvu na zelenou.
3. Dvacet válečků o rozměrech délka 78 mm, průměr 28 mm, které jsou složeny z kartónového papíru a potaženy gázou. Každý váleček možno použít 15 x.
4. Třicet dokumentačních karet s předtiskem pro datum, číslo sterilizátoru, číslo šarže, dále je zde místo pro nalepení exponovaného kruhového indikačního terče, jeho vyhodnocení a místo pro podpis

příslušného pracovníka. Na každou kartu lze nalepit 10 exponovaných indikátorů.

Jedná se o chemický test / emulátor **třídy 6** dle ČSN EN ISO 15882, ČSN EN ISO 11140-1.

Použití:

1. Do kovového válce vložte kruhový test 121 nebo 134°C.
2. Zasuňte papírový váleček do kovového a zajistěte sponkou.
3. Umístěte soupravu do komory sterilizátoru.
4. Odstartujte příslušný program.
Po skončení sterilizačního cyklu vyjměte kovový válec a z něho papírový váleček a indikátor. **Pozor!** Kovový válec je horký! Zkontrolujte barevnou změnu indikátoru.

Sterilizace nevyhovující: Barevná změna testu z purpurové na zelenou **nenastala nebo není úplná**. Sterilizaci je nutno opakovat.

Sterilizace vyhovující: barevná změna testu z purpurové na zelenou **je úplná**.

Test se přitiskne na samolepící dokumentační kartu.

SKLADOVÁNÍ: na suchém místě při pokojové teplotě.

EXPIRACE: 3 roky od data výroby.

MOŽNO ZÍSKAT KOVOVÝ VÁLEČEK ZDARMA.

			
INDIKÁTOR PŘED EXPOZICÍ	INDIKÁTOR PO SPRÁVNÉ EXPOZICI	INDIKÁTOR PŘED EXPOZICÍ	INDIKÁTOR PO SPRÁVNÉ EXPOZICI

				
NEDOSTATEČNÉ ODVDUŠNĚNÍ STERILIZAČNÍ KOMORY A/ NEBO NEDOSTATEČNÁ TEPLOTA A/ NEBO KRÁTKÁ DOBA EXPOZICE	PŘÍLIŠ MOKRÁ PÁRA	PŘÍLIŠ VYSOKÁ TEPLOTA RESP. PŘEHŘÁTÍ	DOBA EXPOZICE BYLA PŘEKROČENA	



ŘEZ VÁLEČKEM BAG-REPAC