

## BAG Cross – Checks F - novinka

Chemický indikátor pro použití ve sterilizátorech sterilizujících nízkoteplotní párou a formaldehydem.

**KATALOGOVÉ ČÍSLO:** 7533

**POČET KS V BALENÍ:** 250

**POPIS:**

Cross-Checks F je chemický indikátor **třídy 4** dle ČSN EN ISO 15882, ČSN EN ISO 111 40-1 ve tvaru obdélníku. V jeho levém horním rohu je černou barvou uveden název výrobku a vpravo nahoře zkratka pro popis způsobu sterilizace, tj. sterilizace formaldehydem.

Vpravo nahoře je pak také v barvě černé uvedena třída indikátoru a norma, kterou indikátor splňuje. V levém dolním rohu je uveden rovněž černou barvou název výrobce a číslo šarže.

Na pravém konci indikátoru je purpurová indikační značka ve tvaru písmene „V“, Cross-Checks F je vhodný pro použití ve sterilizátorech, kde je jako sterilizační médium použita plynná směs formaldehydu s vodní párou při teplotách do 80 °C a podtlaku až 90

kPa. Sterilizační cyklus probíhá cca **60 – 90 minut** při koncentraci formaldehydu 1-2%.

**POUŽITÍ:**

Indikátor vložte spolu se sterilizovaným materiálem do sterilizátoru a odstartujte zvolený sterilizační program.

Po skončení sterilizačního programu vyjměte indikátor a vyhodnoťte barevnou změnu.


**Hodnocení:**

Změna purpurové barvy „V“ na světle zelenou barvu znamená, že obal byl vystaven účinku formaldehydu.

Jestliže není barva písmene „V“ úplně světle zelená nebo nedošlo-li k barevné změně vůbec, znamená to, že kontakt s formaldehydem byl nedostatečný nebo vůbec žádný.

**SKLADOVÁNÍ:** v originálním obalu na suchém místě, při pokojové teplotě 15-27 °C.

**EXPIRACE:** 2 roky od data výroby.

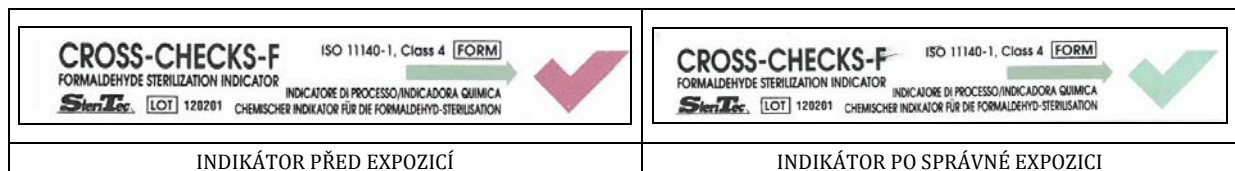

**VÍCE INFORMACÍ O NAŠICH VÝROBCÍCH  
NALEZNETE NA ADRESE**

**[www.bag-healthcare.cz](http://www.bag-healthcare.cz)**